

Gerätebeschreibung
und
Gebrauchsanweisung

Aero Life

2/3

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1 Einleitung	3
1.1 Verwendungszweck	3
1.2 Funktionsbeschreibung	4
1.3 Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise	4
2 Bedienung	5
2.1 Vorbereitung zum Betrieb	5
2.2 Einschalten	6
2.3 Betrieb	6
2.4 Ausschalten	6
3 Störungen und deren Beseitigung	7
4 Reinigung des Gehäuses	9
5 Wartungsintervalle	10
6 Technische Daten	11
7 Lieferumfang	11
8 Garantie	12

1 Einleitung

1.1 Verwendungszweck

Das **Aero Life 2/3** Überdruckinhalationsgerät ermöglicht einem Patienten mit behinderter oder eingeschränkter Atmung, bei geringster Anstrengung langsam und tief zu atmen.

Unter intermittierender positiver Druckbeatmung (IPPB- Intermittierend Positive Pressure Breathing) versteht man eine periodische Beatmung der Lunge mit Luft oder Sauerstoff unter Hilfestellung durch leichten Druck.

Nach chirurgischen Eingriffen ermöglicht IPPB eine tiefe, langsame Atmung und eine bessere Sekretentleerung.

Die Überdruckinhalation mit dem **Aero Life 2/3** sollte jedoch immer nur nach eingehender ärztlicher Untersuchung erfolgen.

Die Anweisungen des Arztes sind exakt zu befolgen.

Aero Life 2

- besonders geeignet für Heimpatienten und Praxis

- durch eingebauten, geräuscharmen Kompressor betrieben

- leicht zu transportieren

Aero Life 3

- für Praxis und Klinik

- druckluft betriebenes Gerät, deshalb risikolos in explosionsgefährdeter Umgebung verwendbar

- universell aufstellbar und zu befestigen (Tisch, Wand Stativ)

Bei einer ausgeprägten Lungen – Insuffizienz muss die Behandlung unter Aufsicht des Arztes erfolgen.

Jede Störung des Wohlbefindens ist unverzüglich dem behandelnden Arzt zu melden.

1.2 Funktionsbeschreibung

Das **Aero Life 2/3** Überdruckinhalationsgerät ermöglicht einem Patienten mit behinderter oder eingeschränkter Atmung, bei geringster Anstrengung langsam und tief zu atmen.

Nach einem Inspirationsimpuls des Patienten pumpt das **Aero Life 2/3** ein Luft - Sauerstoffgemisch mit dem vorher eingestellten Druck in dessen Lungen. Wenn in den Lungen der gewünschte Druck erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch auf Expiration um – der Patient kann frei ausatmen. Unter normalen Bedingungen folgt das **Aero Life 2/3** automatisch der Atemfrequenz des Patienten.

Das **Aero Life 2/3** verhilft dem Patienten durch intermittierenden Druckaufbau zu regelmäßiger Atmung und ermöglicht eine gleichzeitige Aerosol – Therapie.

1.3 Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

Bei der Medikamentenvernebelung dürfen nur die durch den Arzt festgelegten Medikamente eingesetzt werden.

Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des **Aero Life 2/3** ist die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung.

Das Gerät darf nur von dem autorisierten Servicetechniker geöffnet werden.

Wenn das Gerät einen beschädigten Stecker oder eine beschädigte Leitung hat, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde, oder ins Wasser gefallen ist, so muss es von qualifiziertem Servicepersonal überprüft und ggf. repariert werden.

Lässt sich das Gerät nicht ausschalten, so ist der Netzstecker bzw. der Druckluftstecker (**AE3**) aus der Steckdose zu ziehen und der Servicetechniker zu informieren

Das **Aero Life 2/3** und alle Zubehörteile, die mit Sauerstoff in Berührung kommen, sind frei von Öl und Fett zu halten.

Es sind nur Originalteile zu verwenden.

Das **Aero Life 2/3** ist vor Nässe und Feuchtigkeit zu schützen.

Rauchen, offenes Licht und Feuer sind während des Gebrauchs verboten.

Durch elektromagnetische Störungen von außen tritt keine Gefährdung des Anwenders ein.

2 Bedienung

2.1 Vorbereitung zum Betrieb

Das **Aero Life 2/3** ist in einem gut belüfteten, trockenen, kühlen und staubfreien Raum aufzustellen.

Das **Aero Life 2/3** sollte möglichst **nicht** in der Nähe von Heizkörpern, Heizlüftern etc. aufgestellt werden.

Die Luftzufuhr darf **nicht** beeinträchtigt werden, da Kühlluft für den Kompressor benötigt wird.

Beim **Aero Life 2** ist der Netzstecker in eine Steckdose zu stecken.

Beim **Aero Life 3** ist der Druckluftstecker an eine Druckluftanlage anzuschließen.

Das Patienten - Schlauchsystem muss angeschlossen werden. Die Schläuche weisen drei verschiedene Durchmesser auf und passen nur auf die dafür vorgesehenen Anschlüsse gleicher Größe am Gerät.

Die Einstellungen von:

- Beatmungsdruck
- Strömungsgeschwindigkeit
- Startschwelle
- Verneblerleistung
- Ausatemwiderstand

sind entsprechend den Vorgaben des Arztes vorzunehmen.

2.2 Einschalten

Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 10 °C gelagert wurde, muss sich das Gerät an die Zimmertemperatur angleichen, sonst können Betriebsstörungen auftreten.

Zum Einschalten EIN/AUS-Schalter drücken; der Kompressor schaltet sich ein und das Gerät ist betriebsbereit.

Beim **AE 3** wird der Kippschalter betätigt und das Gerät ist betriebsbereit.

2.3 Betrieb


Das Mundstück in den Mund nehmen. Durch den Sog am Mundstück wird die Einatmung ausgelöst. Sie werden nun durch das Gerät beatmet. Ist der eingestellte positive Druck erreicht, schaltet das Gerät um auf Ausatmung. Achten Sie darauf, dass keine Luft durch die Nase entweicht (evtl. Nasenklemme benutzen).

2.4 Ausschalten

EIN/AUS-Schalter drücken (AE 2). Beim (AE 3) Kippschalter betätigen.

Bei längerem Nichtgebrauch ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen (**Aero Life 2**) oder vom Reduzierventil bzw. von der Druckluftanlage zu trennen (**Aero Life 3**).

Bedienungselemente Aero Life 2

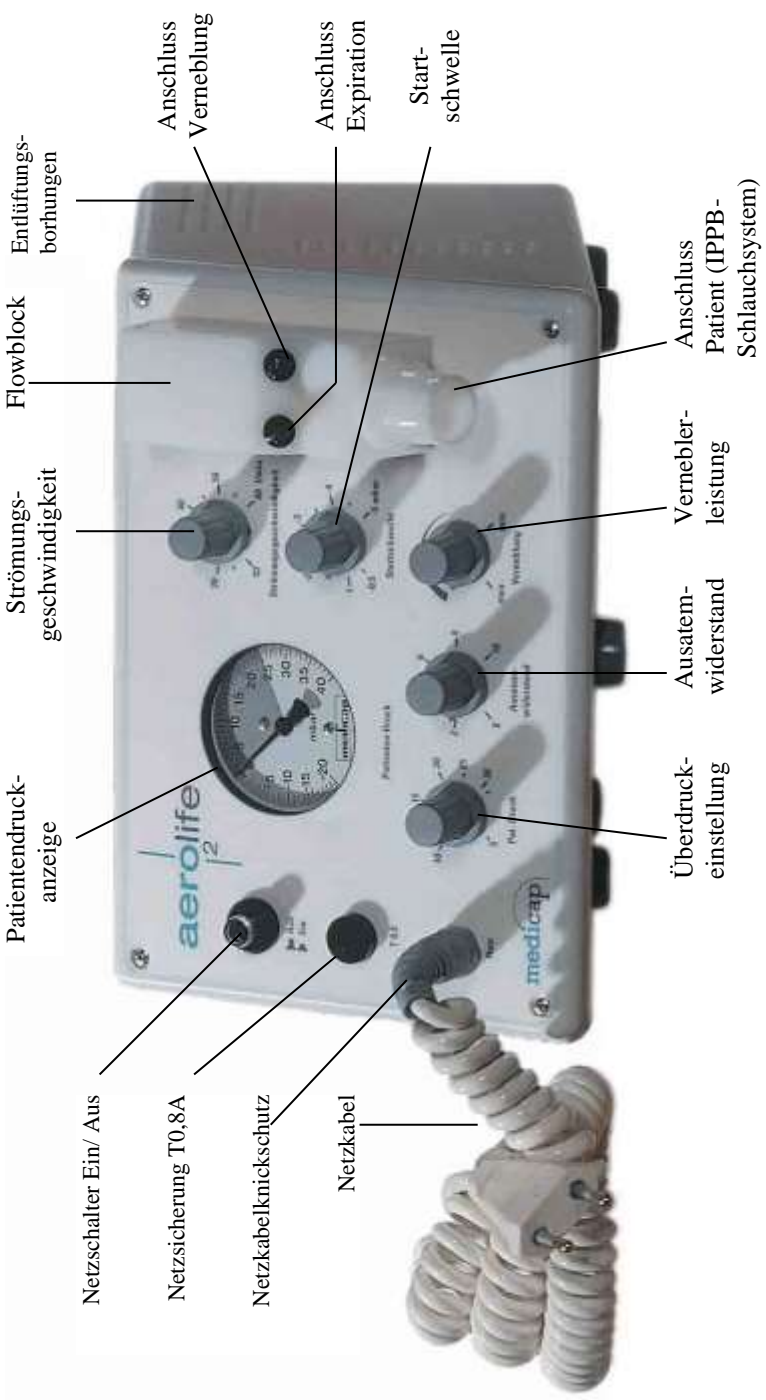

Störungen und deren Beseitigung

Ausfallerscheinung	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Kompressor läuft nicht	Netzstecker nicht in die Steckdose gesteckt	Netzstecker in die Steckdose stecken
	Netzsicherung defekt	Netzsicherung wechseln 0,8 AT
Gerät baut keinen Druck auf	Falsche Einstellung	Die vom Arzt festgelegten Einstellungen vornehmen (Abb.1)
Startschwelle nicht erreicht (Gerät startet nicht bei der Einatmung)	Schlauchsystem nicht korrekt angeschlossen	Schlauchsystem korrekt anschließen, siehe Abschnitt: 2.1.
	Expirationsventil nicht korrekt eingebaut (Abb.2)	Expirationsventil korrekt einbauen (Abb.2)
	Regler Startschwelle nicht korrekt eingestellt (Abb.1)	Die vom Arzt festgelegte Einstellung vornehmen
	Rückschlagventil klebt (Abb.1)	Rückschlagventil säubern (Abb.1)
Keine Verneblung	Verneblerleistung zu klein eingestellt (Abb.1)	Die vom Arzt festgelegte Einstellung vornehmen
	Schlauchsystem nicht korrekt angeschlossen	Schlauchsystem korrekt anschließen, siehe Abschnitt: 2.1.
	Venturidüse im Medikamentenbehälter mit Medikament verklebt	Schlauchsystem austauschen bzw. reinigen
Ausatmung erschwert möglich	Medikamentenbehälter leer	Medikamentenbehälter füllen
	Ausatemwiderstand falsch (zu hoch) eingestellt (Abb.1)	Die vom Arzt festgelegte Einstellung vornehmen
	Rückschlagventil nicht vorhanden oder undicht	Rückschlagventil durch ein neues ersetzen

4 Reinigung des Gehäuses

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, bitte das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Das Außengehäuse Ihres Gerätes können Sie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln abwaschen. Hierbei sollten Sie aber keine scharfen, kratzenden oder ätzenden Mittel benutzen.

Als Desinfektionsmittel können verwendet werden:

- Korsolex FF (Bode Chemie)
- Biguanid Fläche N (Dr. Schuhmacher)
- microzid AF wipes (Schülke)

Das Desinfektionsmittel ist entsprechend der Herstellervorgaben zu verwenden.

Keine Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangen lassen.

5 Wartungsintervalle

Eine regelmäßige Wartung ist einmal jährlich erforderlich, da im Gerät Verschleißteile eingebaut sind. Bei regelmäßigem Gebrauch sollen der Rückschlagventil-Flowblock, der Doppelschalldämpfer und der eingebaute Bakterienfilter gewartet werden.

Wichtig:

Es dürfen nur der Originalfilter verwendet werden.

Ausbau des Filters:

- Das Gerät vom Stromnetz trennen
- Lösen der 4 Kreuzschrauben an der Frontplatte
- Frontplatte abnehmen
- Bakterienfilter aus der Schlauchleitung entfernen
- Neuen Bakterienfilter einsetzen
- Auf die Luftflussrichtung achten
(der Aufdruck INLET muss zum Inneren des Gerätes, in Richtung Kompressor, zeigen)
- Frontplatte wieder schließen und verschrauben
- **Achtung:** Es darf kein Schlauch abgeknickt werden!

6 Technische Daten

Umgebungstemperatur Betrieb:	10 bis 40 °C
Abmessungen:	23 x 15 x 27 cm
Gewicht:	ca. 5 kg
Betriebsspannung:	230 V+/-10% 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 130 W
Energieverbrauch / h:	ca. 0,130 kWh
Druckeinstellung:	0 – 35 mbar
Strömungsgeschwindigkeit:	20 – 60 l/min
Startschwelle:	-0,5 bis – 5mbar
Verneblerleistung:	stufenlos einstellbar
Ausatemwiderstand	stufenlos einstellbar
Steuerung:	assistiert

7 Lieferumfang

empfohlenes Zubehör und Ersatzteile:

- **IPPB System ML**, Ersatzteil Nr. medicap: 002.010
- Mundstück für IPPB-Schlauchsystem, Ersatzteil Nr. medicap: 002.022
- Halterung für IPPB-Schlauchsystem, Ersatzteil Nr. medicap: 002.020
- Bedienungsanleitung AE2/3, Ersatzteil Nr. medicap: 002.198
- Tasche für AE2, Ersatzteil Nr. medicap: 002.017

8 Garantie

Ab dem Lieferdatum gewähren wir für Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, drei Jahre Garantie.

Mängel, die unter den Garantieanspruch fallen, werden im Rahmen unserer Garantiebedingungen behoben.

Darüber hinaus gewährleistet Medicap keine Garantie, wenn der Betreiber die Funktionen des Gerätes durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, nicht bestimmungsgemäße Anwendung oder durch Fremdeingriff gefährdet.

In diesen Fällen geht die Haftung auf den Betreiber über.

Wichtig

Die Garantie kann nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg in Anspruch genommen werden.

0044

medicap homecare GmbH
Hoherodskopfstr. 22
D – 35327 Ulrichstein
Tel.: +49 / 06645 / 970-0
Fax: +49 / 06645 / 970-200